

Floresan Okuma Sistemi için Hızlı Kullanım Klavuzu

1 İnkübatörü açın



İnkübatörü güç kaynağına bağlayarak açın.

2 Kapatın



İndikatör soğuduktan sonra kırın.

3 Kırın



İndikatörü İnkübatör üzerindeki kırıcı ile kırın.

4 Sallayın




İndikatör içindeki mor besiyerinin dip taraftaki spor taşıyıcı şeridi ıslattığını görün.

5 BI'yi inkübe edin



Sterilizasyon işlemi bittikten sonra BI'yi bir yuvaya yerleştirin ve sonucu bekleyin. Pozitif kontrol olarak kullanılan BI'ün sterilize edilmemesi gerekir.

6 Sonuçları kontrol edin

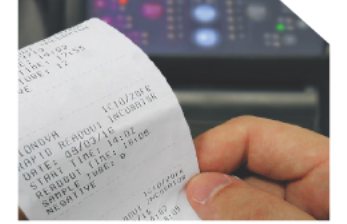

Pozisyon ışığı yeşil ise: Sterilizasyon işlemi başarılı
Pozisyon ışığı kırmızı ise: Sterilizasyon işlemi başarısız.

Hızlı

4 Saat

3 Saat

1 Saat

2 Saat


2 Saat



EO
BT110



STEAM
BT220

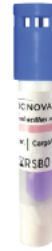

STEAM
BT221



VH2O2
BT95



FORM
BT102

1 Saat

1/2 Saat



STEAM
BT222



STEAM
BT223

UYARI: Sistemi kullanmadan önce Hızlı ve Süper Hızlı Biyolojik İndikatör (BI) kullanım klavuzlarını ve IC10/20FR inkübatör manuelini bütünüyle okumanızı tavsiye ederiz.



TERRAGENE